

### EMOTECA TWIN 250 TOUCH

Cod. DMW0252

Codice identificativo fabbricante DME0252

Classificazione CND Z121701

Codice DM iscritto al repertorio 2508940/R

#### Caratteristiche generali



Disclaimer:

Le immagini hanno scopo puramente dimostrativo. Le caratteristiche e gli accessori del prodotto possono differire in base a modello e applicazione.

#### Destinazione d'uso

Refrigeratore destinato allo stoccaggio e alla conservazione di sangue, liquidi o tessuti corporei destinati ad una trasfusione, somministrazione o introduzione nel corpo.

#### Campo Temperatura

Impostabile tra +2°C / +6 °C

#### Setpoint di fabbrica | Incremento

+4°C | 0,1°C

#### Campo di temperatura ambiente di utilizzo | Classe climatica

Da +16°C a +32 °C | N

#### Capacità nominale

250 lt (8,8 cu ft)

#### Capacità lorda | Capacità netta

264 lt (9,3 cu ft) | 264 lt (9,3 cu ft)

#### Capacità sacche di sangue da 450 ml

150 (con 5 cassette)

#### Dimensioni d'ingombro (LxPxH)

60x66x163,5 cm

#### Dimensioni interne (LxPxH)

50x48,5x107,5 cm

#### Peso netto senza allestimento interno

99 kg

#### Dimensioni imballo | Peso

Cartone su pallet 65x72x180 cm | peso 144,5 kg

Gabbia in legno su pallet 72x77x180 cm | peso 154,5 kg

#### Struttura

Monoscocca costruita in acciaio plastificato bianco atossico interno/esterno rivestito con speciale trattamento antibatterico certificato, oppure con interno in acciaio inox 18/10 Aisi 304. Angoli arrotondati e fondo a vasca

#### Tipologia di isolamento

Poliuretano espanso iniettato tra le pareti ad altissima densità (43 kg/m3), senza utilizzo di CFC e con iniezione ecologica ad acqua.

#### Spessore di isolamento

70 mm schiena / 50 mm fianchi

#### Ruote

No.4 rullini unidirezionali + due piedini di regolazione

#### Porta

No.1 porta in vetro temperato basso emissivo, dotata di chiusura automatica con molla di ritorno e fermo a 90°

#### Serratura elettronica con passcode

Serratura digitale, permette di aprire la porta cliccando un'icona a display. L'apertura della porta può essere protetta da password. Chiave meccanica fornita in dotazione in caso di guasto

#### Illuminazione

Full LED regolabile a tutta altezza vano interno, automatica all'apertura della porta, o tramite interfaccia utente con porta chiusa.

#### Riduzione dei consumi energetici

Funzione Night & Day e ventilatori di tipo elettronico a basso consumo energetico.

#### Cassetti inclusi

Nr.05 cassette completamente estraibili in alluminio con divisori (LxPxH): cm 11,8x40x7,5 (3 corsie)

#### Sistema di refrigerazione

#### Impianto Refrigerazione

Nr. 02 unità refrigeranti a funzionamento alternato, con doppia scheda e doppia sicurezza.

#### Sbrinamento

Automatico, adattivo con evaporizzazione acqua di condensa

#### Refrigerante

Natural R290

#### GWP | ODP

3 | 0

#### FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Direzione e Stabilimento: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy - Tel.+39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028

P.Iva 00934960352 - R.E.A. N. 149865 - N. MECC ESTERO RE 012596

Registro Imprese N. 00934960352- Cod. Identific. CEE IT 00934960352

www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - Pec: fiocchetti@pec.it



|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Controllore</b>                                 | Controllore TOUCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tipo di controllore</b>                         | Controllore elettronico dotato di display FULL TOUCH SCREEN 7" su architettura a microprocessore.<br>La risoluzione è 0,1°C, con indicazione della temperatura facilmente leggibile anche a distanza, grafico in tempo reale delle temperature e tutti i dati operativi sempre rilevabili in homepage.               |
| <b>Interruttore di accensione</b>                  | Integrato in interfaccia utente                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Protezioni di sicurezza</b>                     | Passcode utente impostabile<br><br>Acustico-visivo per allarmi temperature e guasti, attivi anche in assenza corrente grazie a n.8 pile Stilo AA tipo Ni-MH ricaricabili, ecologiche e facilmente sostituibili, per allarme black-out. Indicazione di:                                                               |
| <b>Sistema di allarme</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Porta Aperta</li> <li>• Alta temperatura</li> <li>• Bassa temperatura</li> <li>• Mancanza di corrente</li> <li>• Condensatore sporco</li> <li>• Tutti i guasti funzionali/componenti difettosi</li> </ul>                                                                   |
| <b>DMLP TOUCH Digital Monitor</b>                  | Sistema d'allarme indipendente comprensivo di kit batterie di emergenza per registrazione dati e per allarmi in assenza di corrente, per 12 ore. Monitoraggio e registrazione dati con sonda indipendente di tipo PT100 in classe A+ e campionamento ogni 30 Sec.                                                    |
| <b>Registrazione temperature, dati ed eventi</b>   | Grafico temperature ed ultimi 32 eventi visualizzabili a display, 10 anni di registrazioni su SD card e 1 anno su flash memory, scaricabile tramite USB. Tabella delle temperature MIN e MAX giornaliere visualizzabili a display ed esportabili tramite USB in formato PDF non editabile conforme a CFR 21 part 11. |
| <b>Limiti di allarme temperatura impostabili</b>   | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sensori di controllo</b>                        | Sonde di tipo NTC per controllore + PT100 per monitor indipendente DMLP Sonda PT100 di simulatore prodotto.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Termostato di sicurezza</b>                     | Incluso per prevenire il congelamento ed il surriscaldamento                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Connessione per segnalazione remota allarme</b> | Morsettiera esterna con contatti puliti e porta Ethernet RJ45. Protocollo Modbus TCP/IP disponibile per lettura dati                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Esportazione dati</b>                           | USB, SD ed RJ45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Dati elettrici e funzionali

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Tensione di alimentazione standard</b>    | 230V / 1ph / 50Hz          |
| <b>Cavo spina standard</b>                   | Schuko tipo "G"            |
| <b>Protezione compressore</b>                | Overload Protector incluso |
| <b>Assorbimento istantaneo</b>               | kW 0,17 (Amp 1)            |
| <b>Assorbimento di spunto</b>                | Amp 3                      |
| <b>Rumorosità</b>                            | <45 dBA                    |
| <b>Calore emesso secondo EN 12900</b>        | W 25                       |
| <b>Hold over time a 20°C ambiente (aria)</b> | 4 h (da +4°C a +15°C)      |
| <b>Consumo energetico a 20°C ambiente</b>    | 0,6 kWh/24h                |

## Conformità

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Direttive e regolamenti</b>  | Direttiva 93/42/CEE e relativa modifica 2007/47/CEE, classe IIa secondo Regola 2 Allegato IX e in conformità alle disposizioni transitorie stabilite da REGOLAMENTO (UE) 2017/745 e (UE) 2023/607<br>Norma DIN 13277<br>Direttiva 2011/65/UE (ROHS II)<br>Direttiva 2015/863 UE (ROHS III)<br>Direttiva 2012/19 UE (RAEE)<br>Regolamento (UE) 517-2014 (F-gas)<br>Regolamento (CE) 1907-2006_REACH |
| <b>Certificati disponibili</b>  | CE MDD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ambiente di applicazione</b> | Non infiammabile, non esplosivo, non corrosivo e con ricambio adeguato d'aria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Direzione e Stabilimento: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy - Tel.+39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028  
P.Iva 00934960352 - R.E.A. N. 149865 - N. MECC ESTERO RE 012596  
Registro Imprese N. 00934960352 - Cod. Identific. CEE IT 00934960352  
www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - Pec: [fiocchetti@pec.it](mailto:fiocchetti@pec.it)

## Accessori disponibili su richiesta

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modulo GSM</b>                                              | Modulo plug-in per la notifica tramite sms di monitoraggio, allarmi e guasti del frigorifero su numeri cellulari.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Modulo convertitore 4-20mA</b>                              | (l'accessorio esclude l'inserimento del modulo GSM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Modulo Wi-Fi</b>                                            | Modulo plug-in per connessione, monitoraggio e gestione wireless del frigorifero                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FIOCCHETTI COLD EYES cloud monitoring</b>                   | Servizio di monitoraggio annuale di tipo Cloud con notifica di allarmi e guasti sia da pc che da app, SMS ed email, con scarico completo di tutti i dati di registrazione.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FIOCCHETTI LAN SUPERVISOR</b>                               | Sistema di monitoraggio che permette di monitorare uno o più frigoriferi visualizzando sia quanto sta accadendo sia lo storico. E' possibile creare ed esportare grafici delle temperature del periodo/ore prescelto e dello storico eventi. Con una sola licenza si possono monitorare fino a 100 frigoriferi installati nella stessa struttura e connessi nella stessa rete (es. ospedale). |
| <b>Porta cieca</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Cassetto senza paratie estraibile su guide telescopiche</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Frontale in plexiglass per cassetto</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kit ruote con freno</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Presa interna (no.1)</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Foro passacavi mm 35 con tappo</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Foro passacavi mm 15</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sonda umidità</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sonda PT100 contatti liberi</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Stabilizzatore di tensione di rete</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Cavo spina diverso dallo standard</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Alimentazione 220V/60Hz</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Alimentazione 115V/60Hz</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Imballo in gabbia di legno</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Direzione e Stabilimento: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy - Tel.+39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028  
P.Iva 00934960352 - R.E.A. N. 149865 - N. MECC ESTERO RE 012596  
Registro Imprese N. 00934960352 - Cod. Identific. CEE IT 00934960352  
www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - Pec: [fiocchetti@pec.it](mailto:fiocchetti@pec.it)